

# COVID-19 IgG/IgM ECO Teste


Registro MS: 80954880132

**MENOR REAÇÃO CRUZADA PELA DETECÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ANTICORPO**

## Diagnóstico da fase aguda e convalescente do COVID-19

O diagnóstico precoce e uma resposta adequada são essenciais para o controle eficaz em larga escala da transmissão do COVID-19.

O **COVID-19 IgG/IgM ECO Teste** é adequado para pacientes que apresentaram testes de PCR negativos para coronavírus e apresentam sintomas de pneumonia iniciais ou persistentes por mais de 10 dias.

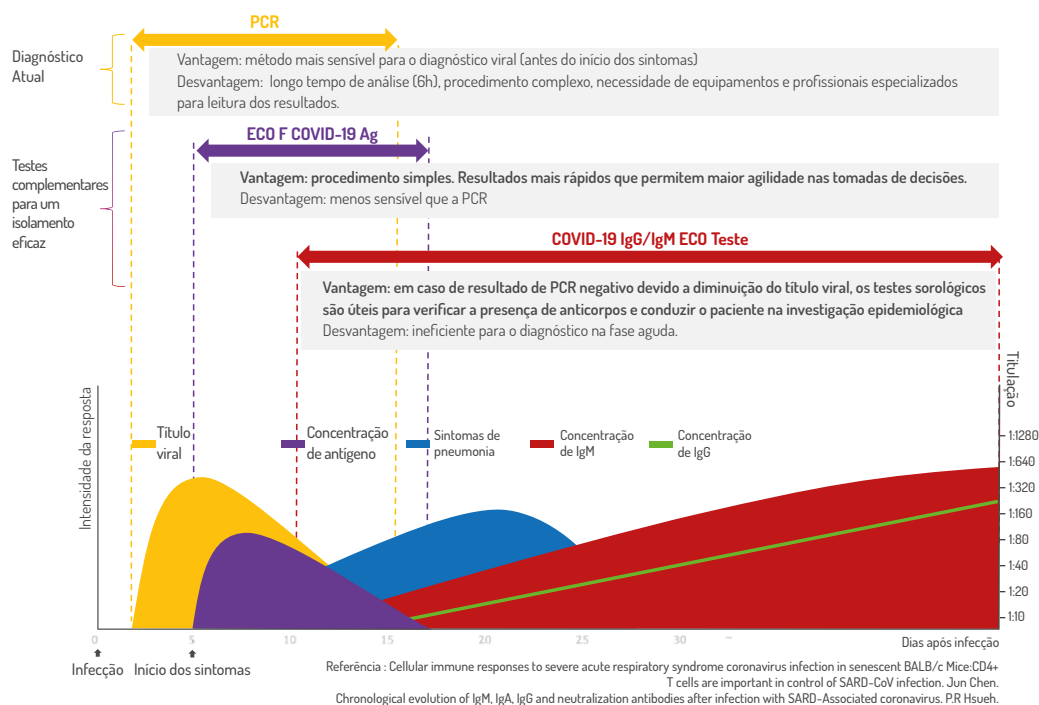

## COVID-19 IgG/IgM ECO Teste

Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19 em amostras de sangue total, soro e plasma.



Adequado para teste Point of Care. Dispensa outros equipamentos.






### Especificações

Informações	Detalhes
Tempo para resultado	10 minutos
Armazenamento e condições de uso	2 a 30°C
Validade	24 meses
Tipo de amostra	Sangue total/soro/plasma
Especificidade	95% (95/100)


## Procedimento do Teste

Os procedimentos para os testes de IgG e IgM são os mesmos.

- 1 Coleta da amostra**  
Utilizando uma pipeta de plástico, coletar 10 µL de soro/plasma/sangue total até a marcação da linha preta.
- 2 Aplicando amostra**  
Aplicar a amostra de soro/plasma/sangue total coletada na cavidade de amostra do dispositivo teste. Descartar a pipeta de plástico após o uso.
- 3 Aplicando o diluente da amostra**  
Aplicar 3 gotas (90 µL) do diluente da amostra na cavidade do diluente no dispositivo teste.
- 4 Leitura do resultado**  
Ler o resultado do teste em 10 minutos. Não ler após 15 minutos. Descartar o dispositivo teste após o uso.

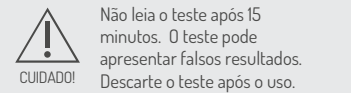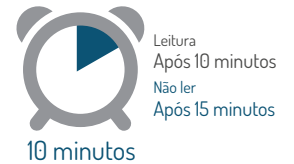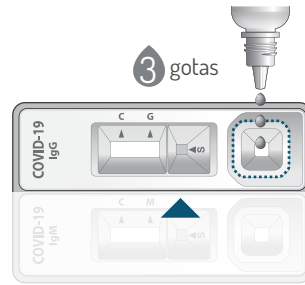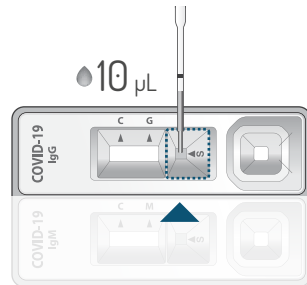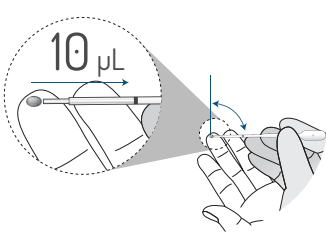

## Interpretação dos resultados

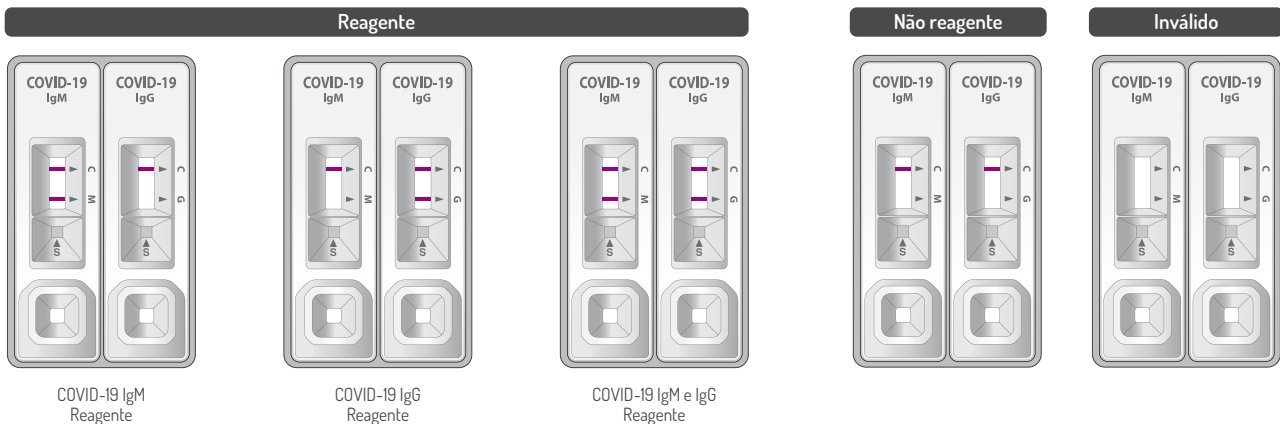

1. Uma linha colorida aparecerá na seção superior das janelas de resultado para demonstrar que o teste está funcionando corretamente. Essa linha se refere à linha Controle (C).

2. Uma linha colorida aparecerá na seção inferior das janelas de resultado. Essas linhas se referem às linhas teste de IgM (M) e IgG (G).

3. Mesmo se as linhas controle e teste forem fracas ou não uniformes, o teste deve ser considerado como propriamente executado e o resultado do teste deve ser interpretado como reagente.

\*Resultados reagentes devem ser considerados em conjunto ao histórico clínico e a outros achados médicos.

\*O COVID-19 IgG/IgM ECO Teste pode apresentar reação sorológica cruzada com anticorpos de SARS.

Produto	Armazenamento	Validade	Apresentação
COVID-19 IgG/IgM ECO Teste	2 a 30 °C	24 meses	10 testes
COVID-19 IgG/IgM ECO Teste	2 a 30 °C	24 meses	20 testes

